


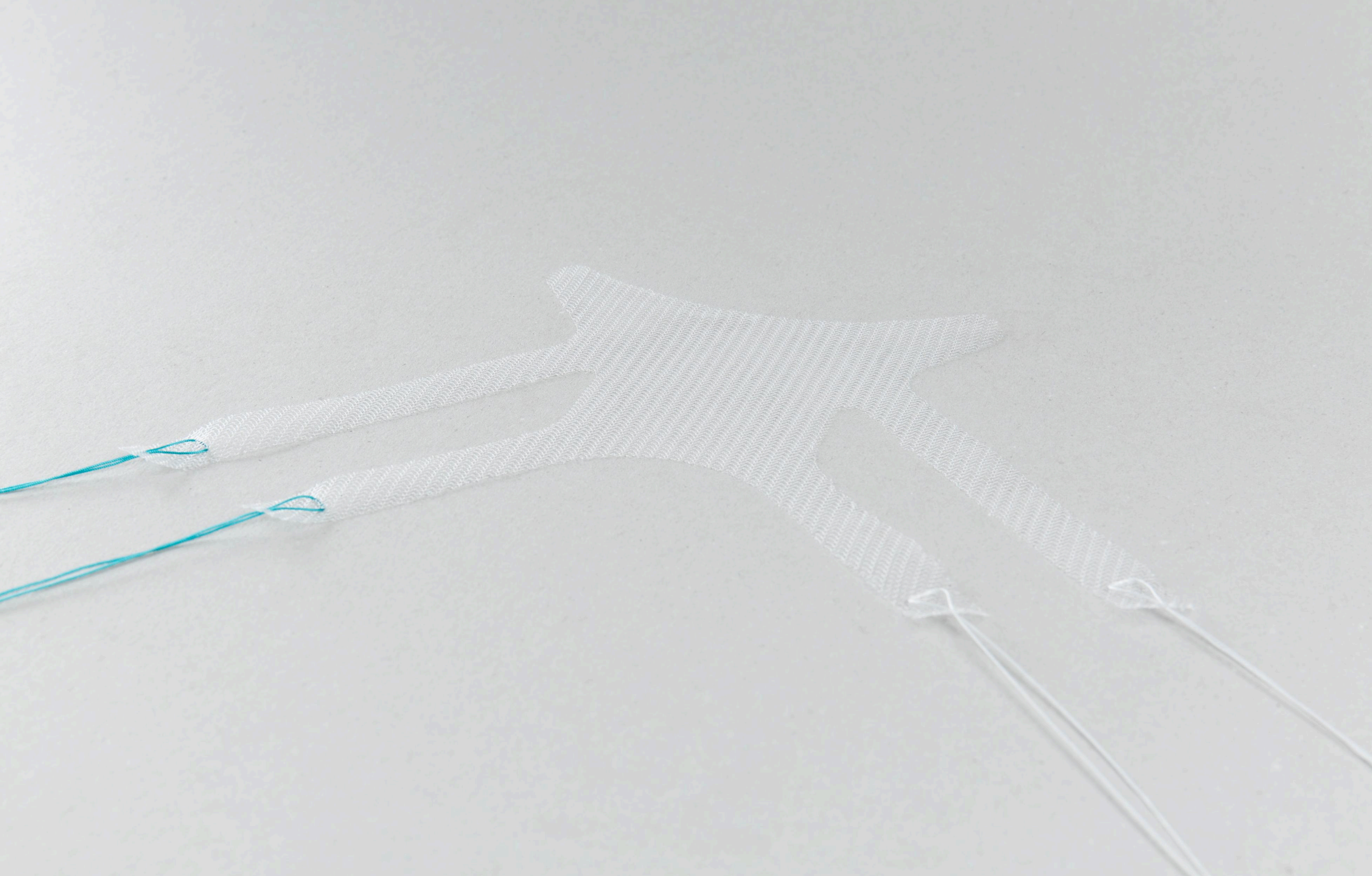

### **Sistema de malla con fijación al sacroespinoso**

Es un sistema ajustable para corregir el prolapso vaginal femenino. Se compone de una malla de 100% polipropileno macroporo con 6 puntos de fijación y un aplicador de arpones con sistema de polea para la fijación posterior en el ligamento sacro-espinoso.

### **Un sistema universal y ajustable para Prolapso**

Las mallas para prolapso, normalmente, han ido asociadas a dos problemas potenciales:

- 1- Acortamiento vaginal: El encogimiento de la malla puede causar un acortamiento de la vagina.
- 2- Erosión: A veces se producen arrugas en las mallas que generan esta erosión en los tejidos.

El Surelift System ha sido diseñado para minimizar éstos dos potenciales problemas.

Surelift tiene dos arpones que fijan la malla al ligamento sacroespinoso para evitar el desplazamiento de la malla cuando ésta se encoja, manteniendo la longitud de la vagina.

**Ajustabilidad:** Una vez que la malla ha sido fijada posteriormente (en el ligamento sacroespinoso) el médico puede ajustarla gracias a los cuatro brazos adicionales, que pasan por el músculo obturador, y permiten que la malla quede plana y libre de tensión, evitando las arrugas y minimizando el riesgo de erosión.

**Versatilidad:** La misma malla puede ser usada para prolapso anterior, de cúpula vaginal y posterior. Para usar la malla para el compartimento posterior, el médico puede cortar los brazos medios y anteriores de la malla, fijando la malla posteriormente al ligamento sacroespinoso y anteriormente a los músculos elevadores.